



# NOWOŚĆ exeol OPA

**Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu. Gotowy do użycia roztwór na bazie aldehydu ortoftalowego do dezynfekcji końcowej przez zanurzenie umytych półkrytycznych i krytycznych, inwazyjnych i nieinwazyjnych termolabilnych wyrobów medycznych wielokrotnego użytku, np. endoskopów.**

- gotowy do użycia
- skuteczność wobec spor (*B. subtilis*, *B. cereus*, *C. difficile*) potwierdzona normą EN 17126
- aktywność używanego produktu do 14 dni

Treści prezentowane w niniejszym materiale przeznaczone są wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych.


**MD**  
**CE 0459**  
Wyrób medyczny Kl. II b  
Preparat do użytku profesjonalnego

**MEDILAB**<sup>®</sup>  
medilab.pl

**NOWOŚĆ**

# exeol OPA

**Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu. Gotowy do użycia roztwór na bazie aldehydu ortoftalowego do dezynfekcji końcowej przez zanurzenie umytych półkrytycznych i krytycznych, inwazyjnych i nieinwazyjnych termolabilnych wyrobów medycznych wielokrotnego użytku, np. endoskopów.**

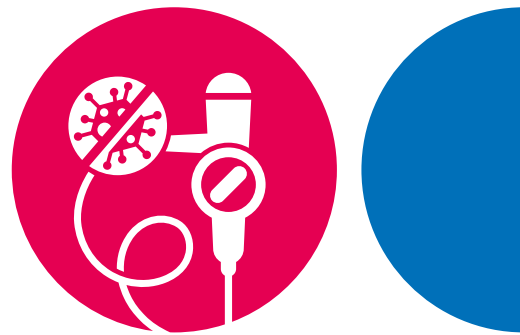

## PODSTAWOWE CECHY

- zalecany do dezynfekcji endoskopów i innych wyrobów medycznych, które nie mogą być poddawane sterylizacji wysokotemperaturowej
- wysoki poziom dezynfekcji: B, Tbc, F, V, S (*B. subtilis*, *B. cereus*, *C. difficile*)
- czas kontaktu od 10 minut
- skuteczność sporobójcza wobec *B. subtilis*, *B. cereus* oraz działanie bójcze wobec spor *C. difficile* R027 potwierdzone zostały na szczepach normatywnych zgodnie z normą EN 17126
- roztwór gotowy do użycia - nie wymaga dodawania aktywatora ani czasu aktywacji
- stosuje się w postaci nierozcieńczonej do uprzednio umytych wyrobów medycznych
- można stosować maksymalnie przez 14 dni
- kontrola aktywności roztworu za pomocą paska testowego (pomiar poziomu aldehydu ortoftalowego)
- ma neutralne pH
- nie pieni się
- ma delikatny zapach

## SKŁAD CHEMICZNY

0,55% aldehyd ortoftalowy (OPA),  
substancje pomocnicze

## SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

**Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie:**

Warunki czyste, gotowy do użycia, 20°C:  
bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze,  
wirusobójcze - 10 min; bójcze wobec spor  
*C. difficile* - 15 min., sporobójcze - 90 min.

## OPAKOWANIA

exeol OPA: kanister - 5 L (EXS0095MLB)

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

Testy paskowe exeol strips OPA:  
tuba - 50 szt. pasków testowych

## INSTRUKCJA UŻYCIA

Przed użyciem **exeol OPA** przeprowadź mycie manualne lub maszynowe oraz płukanie wyrobów medycznych poddawanych procedurze. Przy pierwszym użyciu zdejmij pierścień zabezpieczający przed odkręceniem nakrętki.

1. Odkręć nakrętkę pojemnika i wlej jego zawartość do wanny dezynfekcyjnej. Zamknij pojemnik.
2. Zdemontuj wyroby medyczne i umieść je w roztworze. Upewnij się, że są całkowicie zanurzone a kanały dokładnie wypełnione płynem. Przykryj wannę dezynfekcyjną.
3. Czas kontaktu: od 10 min., w zależności od wymaganego spektrum działania.
4. Po upływie czasu dezynfekcji wyjmij wyroby medyczne i dokładnie wypłucz sterylną lub filtrowaną wodą (0,2 µm).
5. Przed odłożeniem do przechowywania osusz wyroby powietrzem medycznym na uprzednio umytej i osuszonej powierzchni.

Roztwór roboczy exeol OPA zachowuje skuteczność biobójczą do 14 dni od pierwszego użycia i może być wielokrotnie używany. Regularnie sprawdzaj aktywność roztworu za pomocą testów paskowych exeol strips OPA:

1. Zanurz pole kontrolne testu paskowego exeol strips OPA na 1 sekundę w exeol OPA.
2. Natychmiast po wyjęciu lekko potrząśnij paskiem, aby usunąć nadmiar płynu.
3. Dokładnie po 60 sekundach od wyjęcia paska z exeol OPA zaobserwuj kolor pola kontrolnego i porównaj go z wzorcem na opakowaniu.

Nigdy nie interpretuj koloru wcześniej niż w 60 sekundzie od wyjęcia paska z exeol OPA.

Testy paskowe exeol strips OPA są w 100% czułe i dokładne, jeśli przestrzegasz instrukcji użycia.

Przed użyciem zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie.



## DYSTRYBUTOR W POLSCE:

**MEDILAB Sp. z o.o.**

ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska  
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01



marketing@medilab.pl



## WYTWÓRCA:

**Sodel**

190 rue René Barthélemy  
14100 Lisieux, France  
T: +33 (0)2 31 31 10 50  
www.exeol.fr



medilab.pl