



# Fugaten®-Spray

Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych.


- dezynfekcja małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych
- szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie działania
- pełne działanie wirusobójcze
- wygodna i szybka forma aplikacji



Preparat do użytku profesjonalnego.  
Wyrób medyczny kl. II a, CE 0482  
Produkt biobójczy - pozwolenie  
nr 7295/18 (Kat. I, gr. 2 i 4)

# Fugaten®-Spray

Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych.

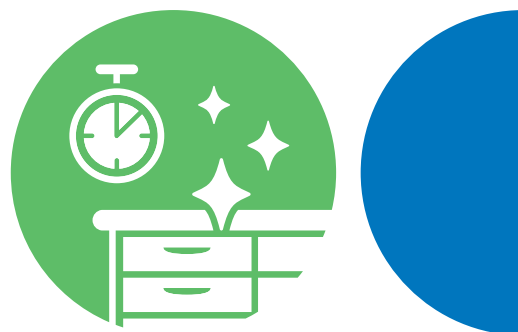

## PODSTAWOWE CECHY

- wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakterio-; drożdżako-; grzybo-; prątko- i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro)
- czas działania: min. 1 min.
- zalecany do powierzchni odpornych na działanie alkoholu
- dopuszczony do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością
- idealny do dezynfekcji zabawek
- możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych
- po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając żadnych śladów

## INSTRUKCJA UŻYCIA

Produkt do użytku profesjonalnego.  
Preparat gotowy do użycia – nie rozcieńczać!  
Dezynfekcja powierzchni czystych.

1. Powierzchnie równomiernie pokryć preparatem (zużywając max. 50 ml/m<sup>2</sup>) przez rozpylanie lub za pomocą nasączonej ściereczki (zalecane jednorazowe chusteczki włókninowe Medilab). Rozpylać z odległości ok. 30 cm na dezynfekowaną powierzchnię. Jednorazowo dezynfekować maksymalnie 2 m<sup>2</sup> powierzchni.
2. UWAGA: nie stosować na materiały wrażliwe na alkohol (np. pleksi, powierzchnie lakierowane, bejcowane).
3. Nie używać w pobliżu źródeł ognia, nie nanosić na urządzenia podłączone do prądu.
4. Powierzchnie kontaktujące się z żywnością po wykonanej procedurze dezynfekcyjnej należy dodatkowo zmyć wodą zdatną do picia.

**Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.**

## SKŁAD CHEMICZNY

**100 g płynu zawiera:**  
etanol (700 mg/g)

## SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

**Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie:**

bakterio-; drożdżako-; grzybo-; prątkobójcze – 1 min. oraz wirusobójcze wobec: HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), Adeno, Rota, Noro – 30 sek. ; Polio – 5 min., Papova SV 40 – 15 min.

## OPAKOWANIA

Fugaten® Spray: butelka – 1 L ze spryskiwaczem  
Fugaten® Spray: kanister – 5 L

## Wyposażenie dodatkowe:

jednorazowe chusteczki włókninowe

## PODMIOT ODPOWIEDZIALNY I DYSTRYBUTOR W POLSCE:

**MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.**  
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska  
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2010-03

## WYTWÓRCA:

**Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH**  
Kaiser-Wilhelm-Str 133  
12247 Berlin • Niemcy  
lysoform.de