



Mediawipes Plus[®]


Chusteczki na bazie alkoholu do dezynfekcji powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia.

- dezynfekcja małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych
- szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie działania
- pełne działanie wirusobójcze
- wygodna i szybka forma aplikacji

Preparat do użytku profesjonalnego.
Wyrób medyczny kl. II a, CE 0482
Produkt biobójczy - pozwolenie
nr 8178/20 (Kat. I, gr. 2 i 4)

Mediwipes Plus®

Chusteczki na bazie alkoholu do dezynfekcji powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia.

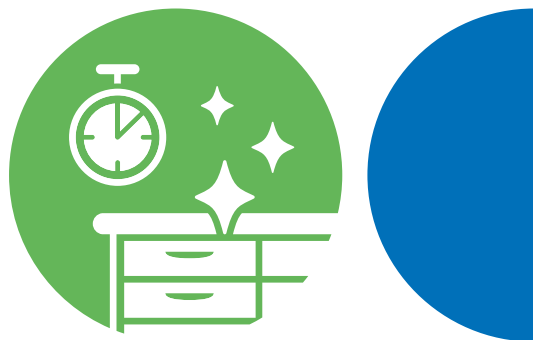

PODSTAWOWE CECHY

- wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakterio-; drożdżako-; grzybo-; prątko- i wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro)
- czas działania: 1 min.
- zalecane do powierzchni odpornych na działanie alkoholu
- dopuszczone do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością
- idealne do dezynfekcji zabawek
- możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych i noworodkowych
- dostępne w różnych opakowaniach, w tym w komfortowym opakowaniu typu flow-pack – zawierającym chusteczki w dużym rozmiarze i wysokiej gramaturze

INSTRUKCJA UŻYCIA

Produkt do użytku profesjonalnego.
Jednorazowe chusteczki gotowe do użycia.

1. Otworzyć opakowanie i wyjąć chusteczkę.
2. Przetrzeć chusteczką całą powierzchnię dezynfekowanego wyposażenia.
3. Odczekać zalecany czas ekspozycji – min. 30 sekund.
Nie spłukiwać.
4. Pozostawić do wyschnięcia. Pojemnik z chusteczkami szczelnie zamknąć.
5. UWAGA: – nie stosować na materiały wrażliwe na alkohol (np. pleksi, powierzchnie lakierowane, bejcowane),
– nie używać w pobliżu źródeł ognia, nie nanosić na urządzenia podłączone do prądu.
6. Powierzchnie kontaktujące się z żywnością po wykonanej procedurze dezynfekcyjnej należy dodatkowo zmyć wodą zdatną do picia.

Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

SKŁAD CHEMICZNY

100 g płynu zawiera:
etanol (700 mg/g)


SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Preparat wykazuje potwierdzone badaniami działanie:

bakterio-; drożdżako-; grzybo- i prątkobójcze – 1 min. oraz wirusobójcze wobec: HIV, HBV, HCV, Corona (Vaccinia), Adeno, Rota, Noro – 30 sek.; Polio – 5 min., Papowa SV 40 – 15 min.

OPAKOWANIA

Mediwipes Plus®: tuba – 100 szt.
Mediwipes Plus®: wkład uzupełniający – 100 szt.
Mediwipes Plus®: opakowanie flow-pack – 48 szt.
Rozmiar: 13 cm x 19 cm; 18 cm x 20 cm

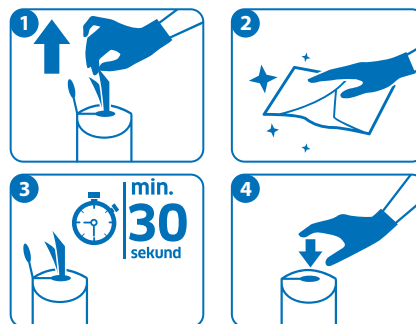

DYSTRYBUTOR W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01

WYTWÓRCA:

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Kaiser-Wilhelm-Str 133
12247 Berlin • Niemcy
lysoform.de

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2011-02