


# Instrukcja przygotowania i stosowania preparatu

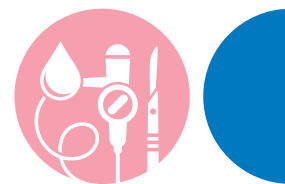


## Medizyme Foam




Trójenzymatyczny preparat w pianie do mycia narzędzi i innych wyrobów medycznych.

**Produkt do użytku profesjonalnego.  
Gotowy do użycia - nie rozcieńczać!**

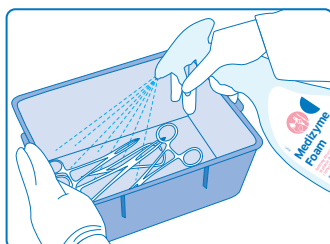


1

Zanieczyszczone narzędzia umieścić w wanience dezynfekcyjnej. Równomiernie nanieś piankę bezpośrednio na myte wyroby medyczne.

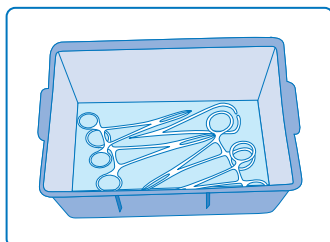


2

Upewnij się, że powierzchnia narzędzi jest dokładnie pokryta.

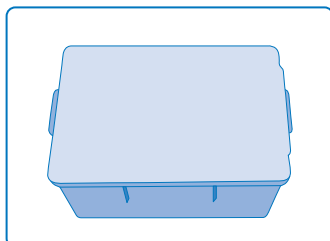

3

Wanienkę dezynfekcyjną przykrywaj po każdorazowym umieszczeniu nowych narzędzi i zwilżeniu ich preparatem. Odczekaj 15 minut od momentu zwilżenia do czynności spłukania. Narzędzia transportuj w zamkniętej wanience.

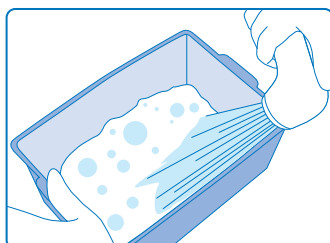

4

Dokładnie wypłucz wyroby medyczne przed przystąpieniem do manualnego lub maszynowego procesu mycia i dezynfekcji.