



**Kompleksowy
program higieny**

Bezpieczny gabinet stomatologiczny

STERISOL ÄKTA LIQUID SOAP

Mydło do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Przebadane dermatologicznie oraz zgodnie z normą EN 1499. Dedykowane do dozownika Sterisol.

STERISOL AHD 1000

Płyn na bazie etanolu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro). Dedykowany do dozownika Sterisol.

STERISOL PHAGO'GEL

Żel na bazie etanolu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro). Dedykowany do dozownika Sterisol.

ENZYMEX L9

Trójenzymatyczny koncentrat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi i innych wyrobów medycznych. Spektrum biobójcze: B, Tbc (M. terrae), Y (C. albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes). Stężenie: min. 0,5%. Czas działania: 10 min.

TASKI SPRINT DEGERM

Koncentrat do dezynfekcji i mycia podłóg oraz różnego rodzaju wyposażenia. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Adeno, Noro, Rota). Stężenie: min. 0,5%. Czas działania: min. 5 min.

OXIVIR PLUS

Koncentrat do dezynfekcji i mycia wszystkich zmywalnych dużych powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (Polio, Adeno, Noro). Stężenie: min. 2,5%. Czas działania: min. 5 min.

OXIVIR PLUS SPRAY

Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V. Czas działania: min. 5 min. Produkt do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych (krew, wydzieliny, wydaliny, w tym plamy moczu). Posiada certyfikat WoolSafe.

LYSOFORMIN PLUS-SCHAUM

Gotowy do użycia preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Papowa - SV 40). Czas działania: min. 5 min. Nieograniczona kompatybilność materiałowa.

MEDIWIPES DM

Chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, VRS, H1N1, HSV, Rota, Polyoma). Czas działania: min. 5 min.

OXIVIR SPORICIDE WIPE

Chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V, S (B. subtilis, C. difficile, C. difficile R027). Czas działania: min. 1 min. Inaktywują zanieczyszczenia organiczne (w tym plamy moczu).

CHLOR-CLEAN

Sporobójczy preparat w tabletkach na bazie chloru do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz wyposażenia pomieszczeń. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V, S (B. subtilis, C. difficile, C. difficile R027, C. sporogenes, C. perfringens). Czas działania: min. 5 min. Do dezaktywacji plam krwi oraz innych zabrudzeń organicznych.

CHLOR-CLEAN WIPES

Inkrustowane chlorem suche chusteczki do ogólnej dezynfekcji i mycia powierzchni oraz wyposażenia pomieszczeń (aktywowane poprzez nasączenie zimną wodą). Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V, S (B. subtilis, C. difficile, C. difficile R027, C. sporogenes, C. perfringens). Czas działania: min. 5 min. Dedykowane również do dezaktywacji plam krwi oraz innych zabrudzeń organicznych (użycie na sucho).

MEDIQUICK

Gotowy do użycia preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Spektrum biobójcze: B, Tbc, Y, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro). Czas działania: min. 30 s.

AERODESIN 2000

Gotowy do użycia alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia. Spektrum biobójcze: B, Tbc, Y, V (Polio, Adeno, Noro). Czas działania: min. 1 min.

OXIVIR SPORICIDE

Sporobójczy gotowy do użycia preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni oraz różnego rodzaju wyposażenia. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V, S (B. subtilis, C. difficile, C. difficile R027). Czas działania: min. 1 min.

MEDIWIPES PLUS

Chusteczki nasączone alkoholem do dezynfekcji powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz różnego rodzaju wyposażenia. Spektrum biobójcze: B, Tbc, F, V. Czas działania: min. 1 min.

STERYLIZATOR MAMMOOTH

Autoklaw klasy B z Fazą Próznią Frakcjonowaną - wyposażony jest w pompę próżniową o wysokiej wydajności jak i w system chłodzący dla szybszego usuwania powietrza, co skutkuje skróceniem czasu trwania cyklu.

MEDIROLL

Rękawy papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu.

MEDIBAG

Samoprzylepne torebki papierowo-foliowe do sterylizacji parą wodną.

TESTY DO KONTROLI STERYLIZACJI

Test kontroli skuteczności procesu sterylizacji gorącą parą wodną, tlenkiem etylenu lub suchym gorącym powietrzem w autoklawach.

Bezpieczny gabinet stomatologiczny

Procedury higieniczne.



REJESTRACJA, POCZEKALNIA

Przed każdym pacjentem

- Należy zdezynfekować ręce.

Po każdym pacjencie

- Należy zdezynfekować długopis i podkładkę na dokumenty jeśli są dotykane przez pacjenta.
- Należy zdezynfekować ręce.
- Należy wykonać dezynfekcję klamek, drzwi wejściowych, poręczy wewnątrz i na zewnątrz, co godzinę lub po wyjściu każdego pacjenta.

Po każdym dniu roboczym i zawsze w razie potrzeby

- Należy zdezynfekować wszystkie powierzchnie dotykowe tj. pulpity, blaty, stoliki, miejsca siedzące.
- Należy zdezynfekować telefony, biurka, powierzchnie sprzętu komputerowego tj. klawiatura, myszka, monitor.

W rejestracji/poczekalni powinien być dostępny środek do dezynfekcji dłoni przeznaczony dla pacjenta. Najlepiej umieszczony w dozowniku łokciowym, bezdotykowym (uruchamianym bez kontaktu z dłonią) wraz z instrukcją.

GABINET ZABIEGOWY

Przed każdym pacjentem

- Należy zdezynfekować ręce.
- Należy założyć czysty fartuch, maskę, gogle/przyłbicę i rękawiczki.
- Należy założyć jednorazowe ochraniacze foliowe na czujniki rentgenowskie, ssaki, rękawy stomatologiczne, spluwaczki, lampy przy unicie.
- Należy przygotować sterylne narzędzia.

Po każdym pacjencie

- Należy zdezynfekować ręce.
- Należy używane narzędzia umieścić w wannie dezynfekcyjnej z roztworem środka dezynfekcyjnego.
- Należy spluwaczkę ostrożnie opróżnić bezpośrednio do pojemnika z materiałem zakaźnym i zdezynfekować.
- Należy zdezynfekować powierzchnie dotykowe unitu, lampy, klamek, uchwytów, asystora, blatów mebli, klawiatury komputera, myszki, krzesel, taboretów.

Po każdym dniu roboczym i zawsze w razie potrzeby

- Należy zdezynfekować wszystkie powierzchnie dotykowe tj. blaty, stoliki, miejsca siedzące.
- Należy zdezynfekować telefony, biurka, powierzchni sprzętu komputerowego: klawiatura, myszka, monitor.
- Należy zdezynfekować klamki, włączniki światła itp.
- Należy umyć i/lub zdezynfekować podłogę.

Okresowo i zawsze w razie potrzeby

- Należy przeprowadzić dezynfekcję pomieszczeń gabinetu używając urządzeń do dezynfekcji drogą powietrzną.

Procedury dezynfekcji przedmiotów i/lub powierzchni dotykowych należy prowadzić poprzez przecieranie: jednorazowymi gotowymi chusteczkami dezynfekującymi, pianką lub jednorazowym czyściwem nasączonym preparatem dezynfekującym i/lub myjąco-dezynfekującym.

Zaleca się wybór środków dezynfekcyjnych o skuteczności bójczej udokumentowanej badaniami normatywnymi dla obszaru medycznego.

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 53 • F: 085 747 93 28
handlowy@medilab.pl